

INSTRUCCIONES PARA DESECHAR EL CONTENEDOR DE AGUJAS USADAS

Siga los pasos a continuación para reemplazar y desechar el contenedor de agujas usadas

- 1 CONTENEDOR CASI LLENO** - **HealthBeacon** le avisará cuando el contenedor de agujas usadas esté casi lleno y automáticamente le enviará uno nuevo.
- 2 CONTENEDOR LLENO** - cuando aparezca el mensaje “Contenedor lleno” en la pantalla, es hora de reemplazar su contenedor de agujas usadas.
 - **Abra** la puerta lateral y retire el contenedor de agujas usadas.
 - **Bloquee** el contenedor de agujas usadas deslizando la tapa superior para cerrarla.
 - **Deslice** el nuevo compartimiento de reemplazo dentro de HealthBeacon, asegurándose de que la puerta de la tapa blanca esté abierta y del mismo lado que la parte frontal de la unidad HealthBeacon.



3

NO DEVUELVA EL CONTENEDOR DE AGUJAS USADAS EN EL CORREO

Deseche el contenedor de agujas usadas según las pautas de su estado. Puede encontrar más información sobre las pautas estatales en:

www.SafeNeedleDisposal.org